



FICHA TÉCNICA

Data: 01-02-2021

Versão A/00

Artigo nº	MASKN001 - RESPIRADOR FFP2 S/VALVULA (referência fabricante BT-005)
Descrição	MÁSCARA RESPIRADOR FFP2 S/VALVULA, EN 149:2001 + A1:2009, COM ELÁSTICOS, CLIP NASAL, COR BRANCA

Material	Quatro Camadas em Tecido
	1 camada externa - em não tecido 60gr/m ² ± 2g/m ²
	2 camada - filtro de algodão 35gr/m ² ± 2g/m ²
	3 camada - não tecido melt-blown 25gr/m ² ± 2g/m ²
	4 camada - não tecido melt-blown 25gr/m ² ± 2g/m ²
	5 camada interna - não tecido 28gr/m ² ± 2g/m ²
	Clip Nasal Metálico suave e de fácil ajuste para reduzir a inalação de patógenos
	Elásticos fixos por soldadura, sem agrafos de forma a garantir maior resistência

Malha larga para reduzir o estrangulamento e conferir mais conforto durante a sua utilização

Tamanho	160 x 105 mm (±2mm)
---------	---------------------



Requisitos de Qualidade	BFE ≥ 95%, dimensão de partículas: 3.0 µm Diferencial de pressão: < 40 ΔP (pa/cm ²) Norma: 149_2001 + A1:2009
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Embalagem Primária	Tipo	Caixa Desdobrável
	Dimensões	19,5cm x 13cm x 13cm
	Material	Cartolina, 350 g/m ²
	Unidades/Caixa	50 pcs / Caixa

Impressão		Máscara de Protecção Respiratória	Masque de Protection Respiratoire
		FFP2 NR	FFP2 NR
	INSTRUÇÕES PARA A COLOCAÇÃO DA MÁSCARA INSTRUCTIONS POUR PLACER LE MASQUE		REF MASKN001
	<p>1. Abra a embalagem, retire a máscara e verifique se está intacta. 2. Segurando a máscara com a mão coloque o elástico atrás das orelhas e ajuste a máscara de forma a cobrir completamente o nariz e a boca. 3. Encaixe bem a máscara na parte do nariz pressionando a área do clipe, para que fique firmemente fixada e adaptada à forma do nariz. 4. Se a máscara estiver danificada, suja ou molhada, substitua por uma nova imediatamente.</p> <p>1. Ouvrez l'emballage, retirez le masque et vérifiez qu'il est intact. 2. En tenant le masque avec votre main, placez l'élastique derrière les oreilles et ajustez le masque pour couvrir complètement nez et bouche. 3. Ajustez le masque fermement sur le nez en appuyant sur la zone du clip, de sorte qu'il soit solidement fixé et adapté à la forme du nez. 4. Si le masque est endommagé, sale ou humide, remplacez pour un nouveau immédiatement.</p>		
	<p>LOT: Ver Certificado de conformidade voir certificat de conformité</p> <p>2 anos / 2 ans Ver Certificado de conformidade Voir certificat de conformité</p> <p>(Manufacturer) - ver na caixa / Sur la boîte</p> <p>Imported By: MEDIRM LDA, Z.1 Lote 11, Rua B, 2 Fase, 7490-324 Mora - Portugal Telf. +351266403826 Email: geral@medim-lda.com</p>		



FICHA TÉCNICA

Data: 01-02-2021

Versão A/00

Embalagem Secundária	Tipo	Caixa de Cartão
	Dimensões	68 x 40 x 54.5cm (CxLxA)
	Material	Cartão Castanho
	Caixas / Cartão	40 cxs / Cartão
Fabricante	Shandong Jiangpo Sanitary Products Co. Ltd East of Nanding Village, Laozhaozhuang Town, Linqing, Liaocheng, Shandong China	
Distribuidor	Exaclean Lda Estrada da Liberdade, 2025-040 Alcanede www.exaclean.pt	